




Advanced Technology for Beds

Istruzioni di montaggio kit dispositivo di sicurezza
coste sensibili Mod. Aladino Elektra

Assembly instructions for safety sensors device
Mod. Aladino Elektra

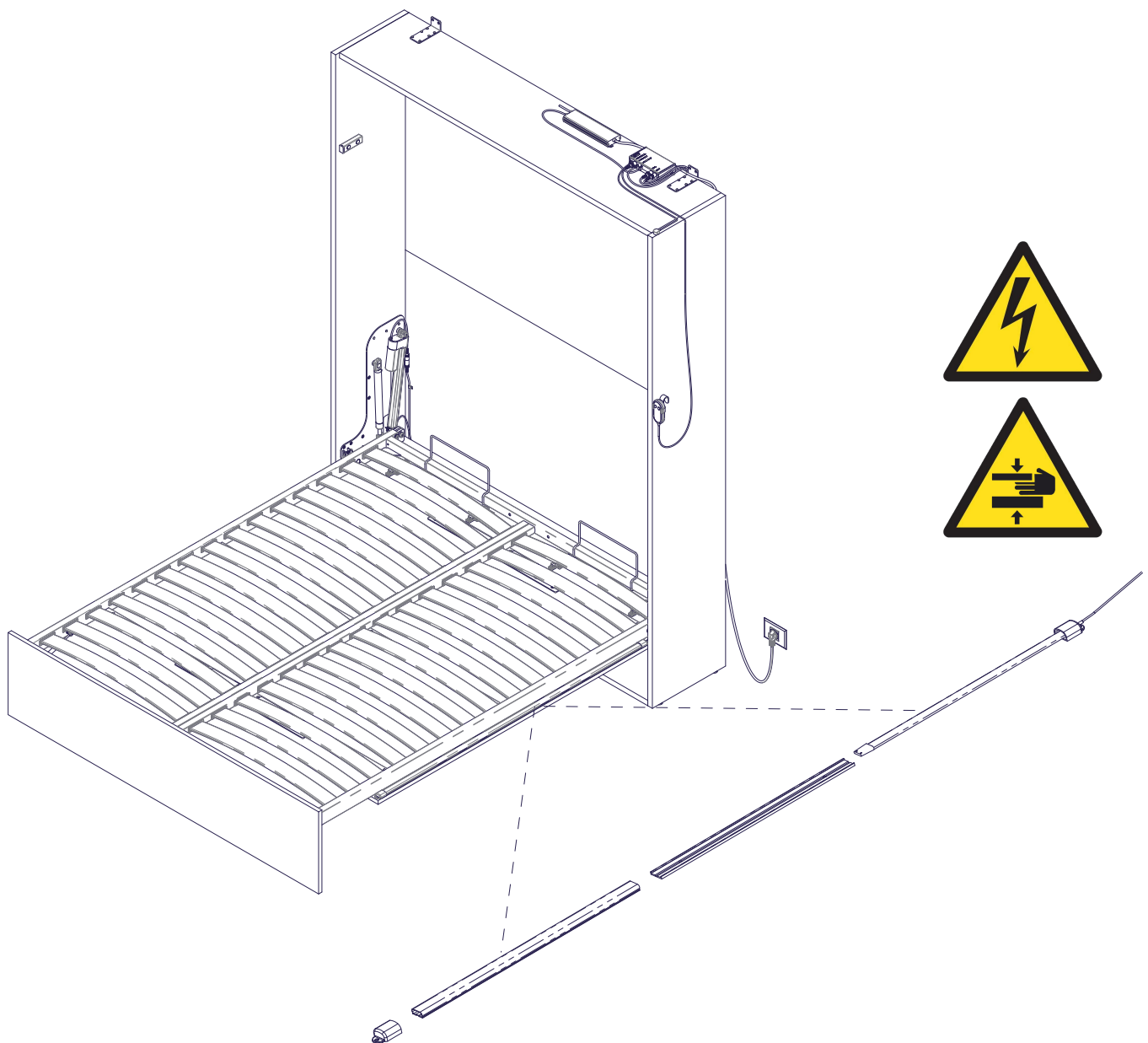


ITALIANO
ENGLISH


M A D E I N I T A L Y

02/07/2020


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

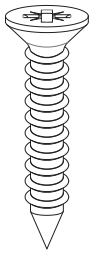




A
Ø3x15

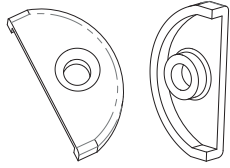


B x4

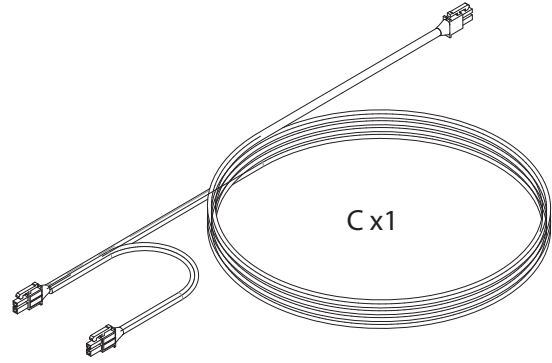

C x1


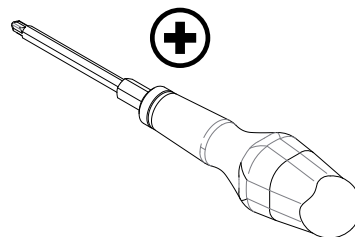
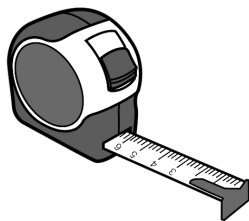
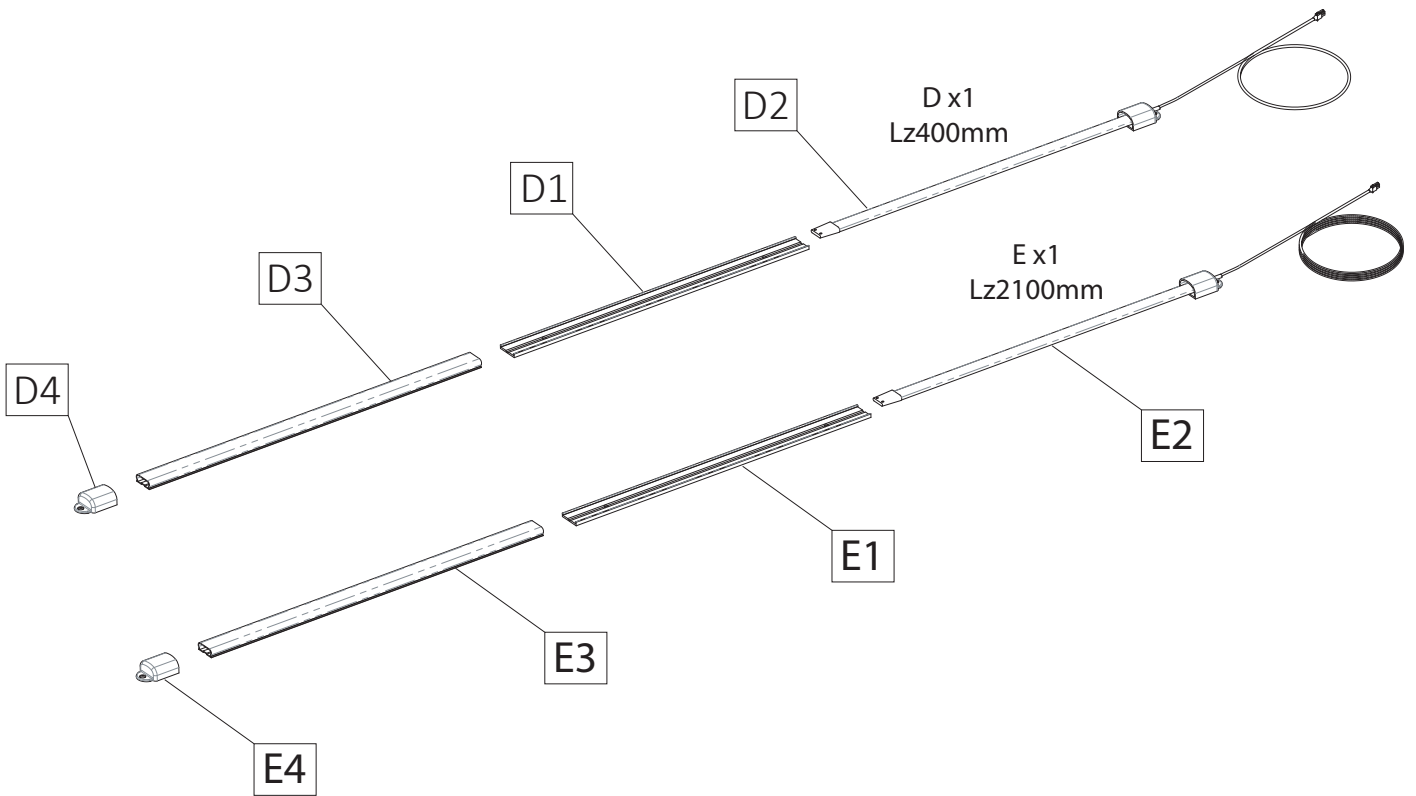


STEP 01

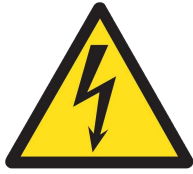


Prima di effettuare qualsiasi operazione, assicurarsi di aver tolto la tensione dall'impianto da almeno 10 secondi.

Prior to start any operation, make sure that electricity has been unplugged since at least 10 seconds.

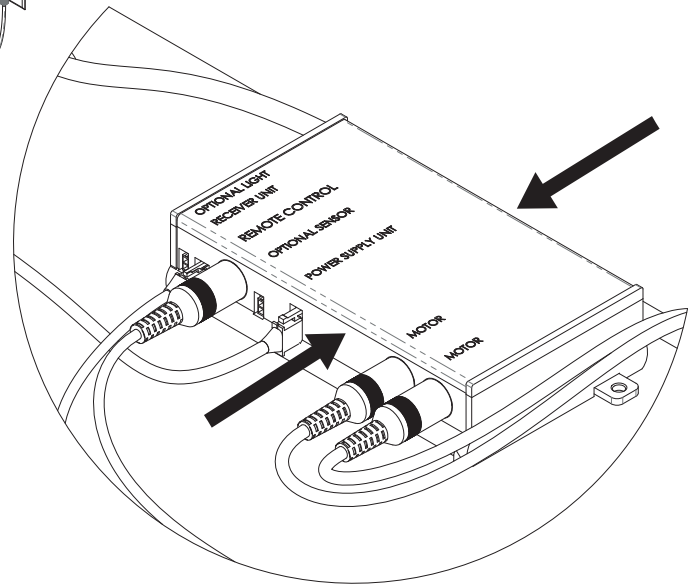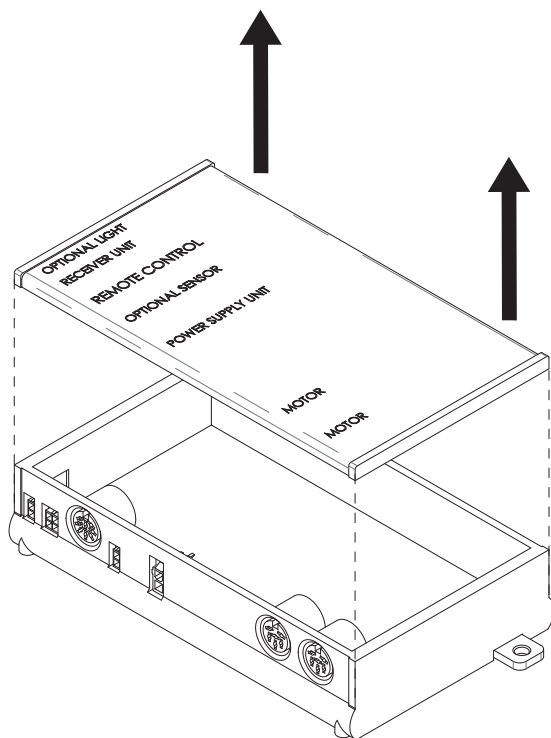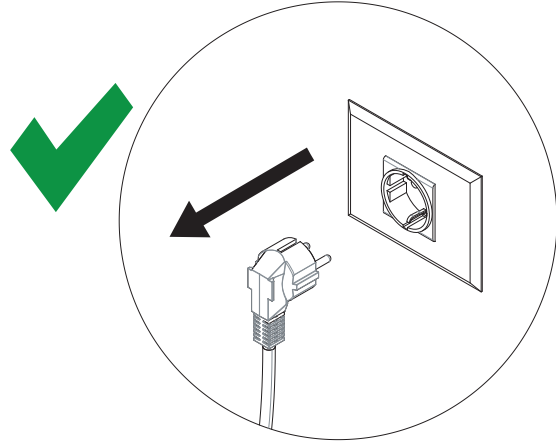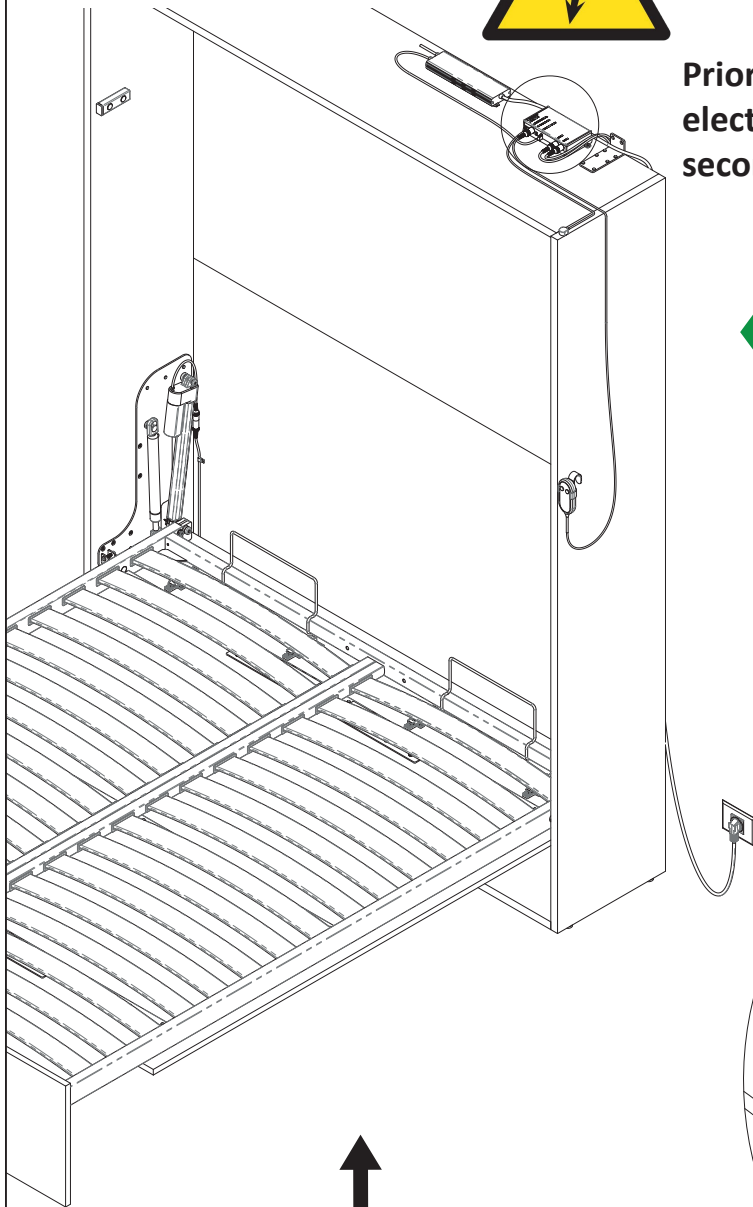


STEP 02

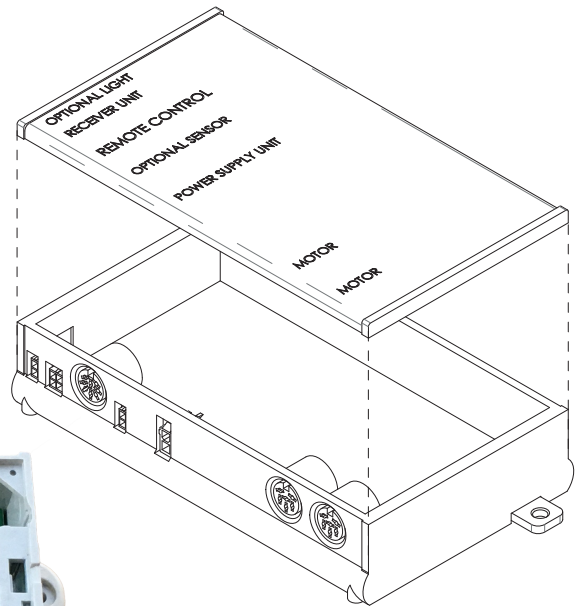



Rimuovere la pellicola protettiva gialla dallo switch in figura, e aiutandosi con un piccolo cacciavite posizionare lo switch n°3 in posizione ON.

Attenzione! Una volta effettuata l'abilitazione dello switch n°3 il meccanismo funziona solo con i dispositivi di sicurezza connessi.


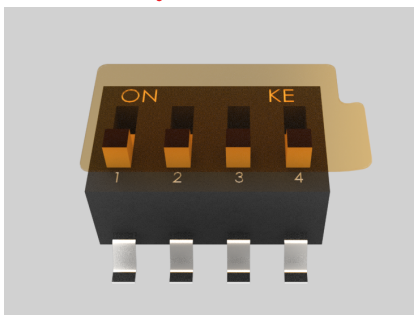


Remove the yellow protection film from the switch, as on picture, and by means of a small screw-driver, position the switch Nr.3 on position ON.





Caution! Once the switch Nr.3 has been switched on, the bed system works only with connected safety device.

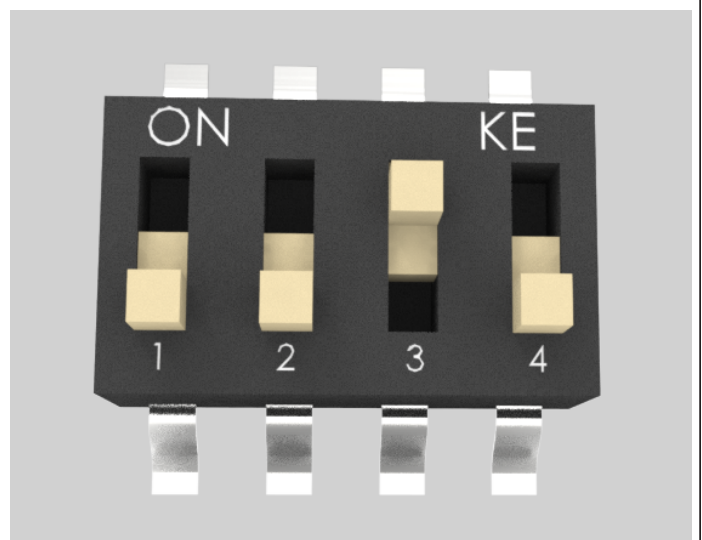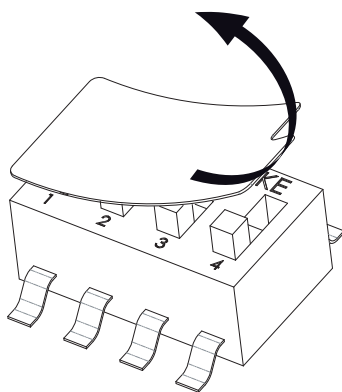


STEP 03

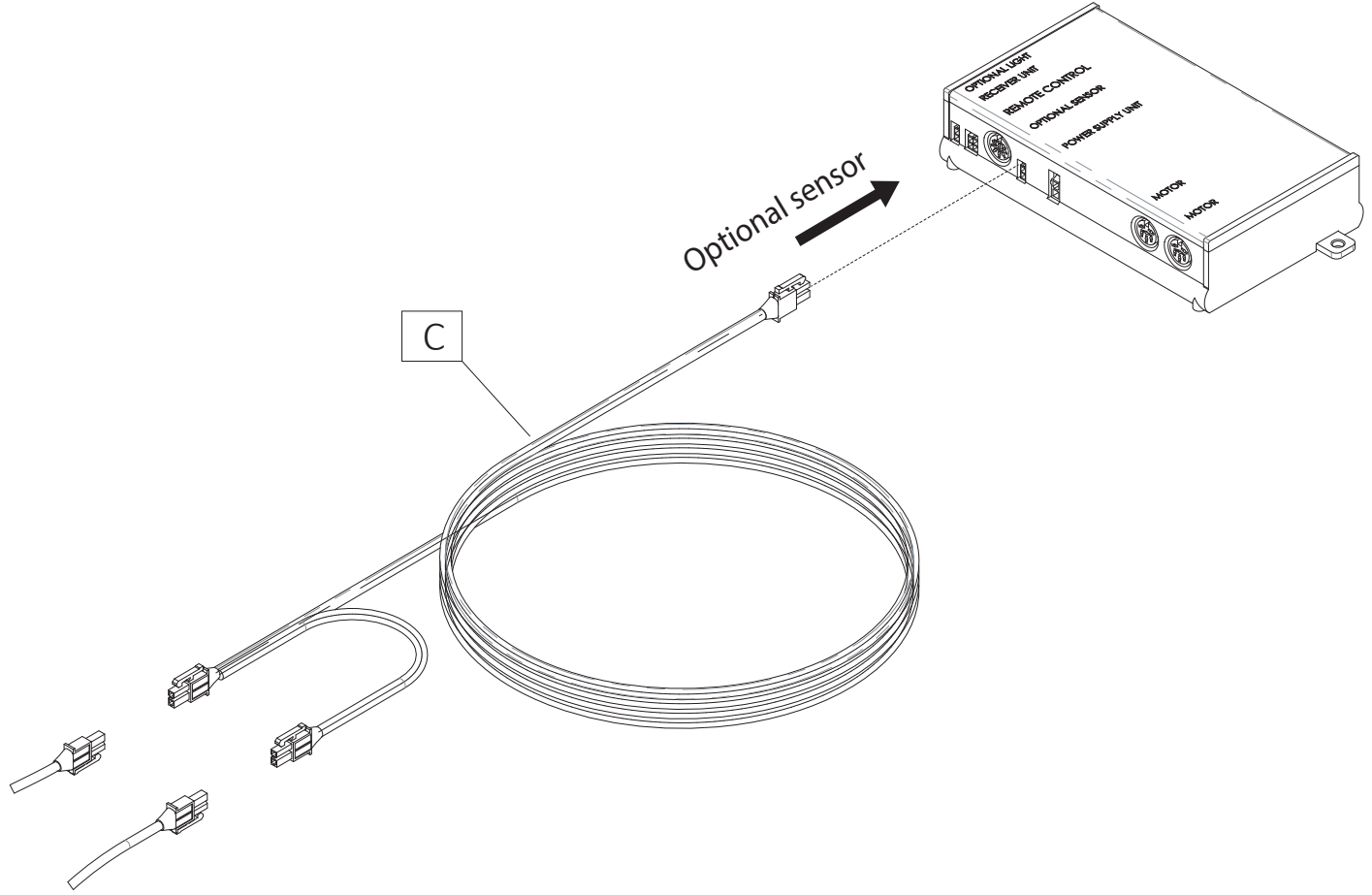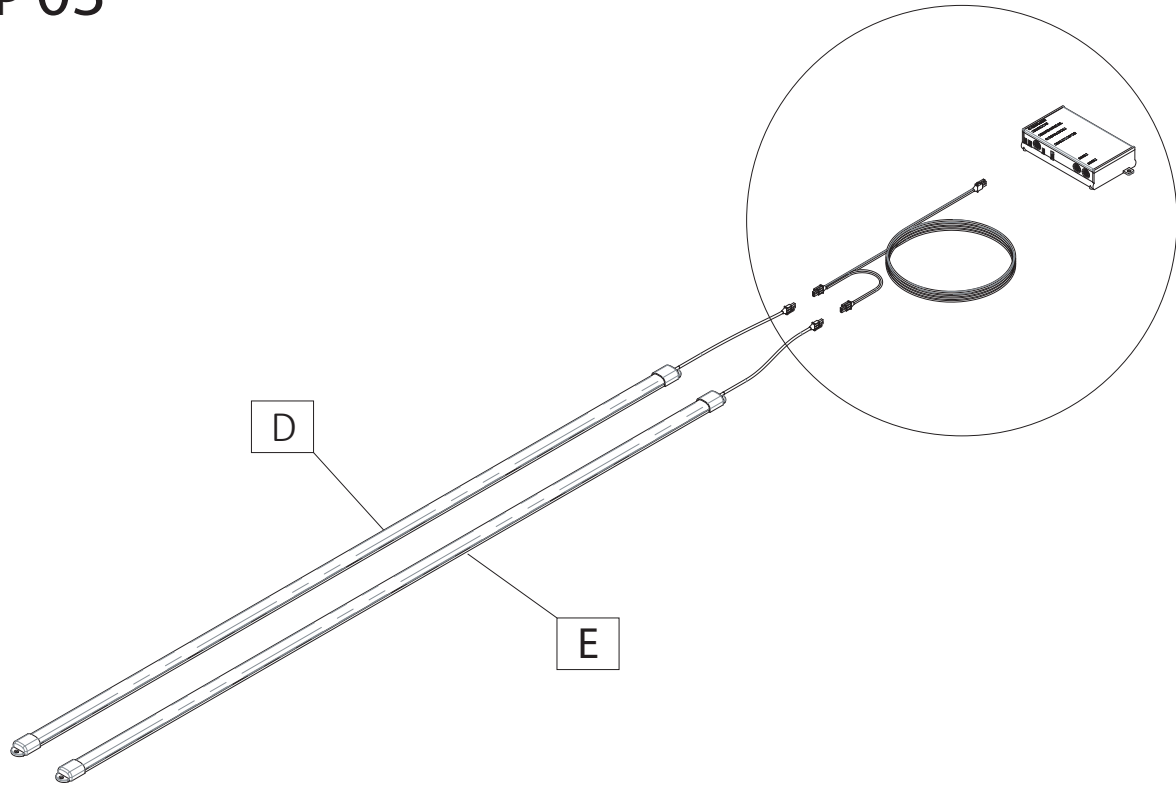


STEP 04

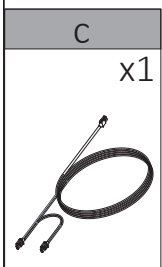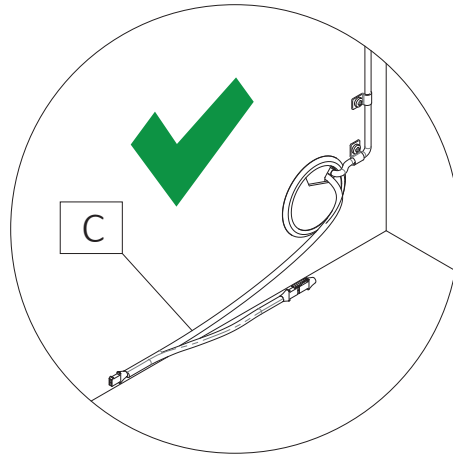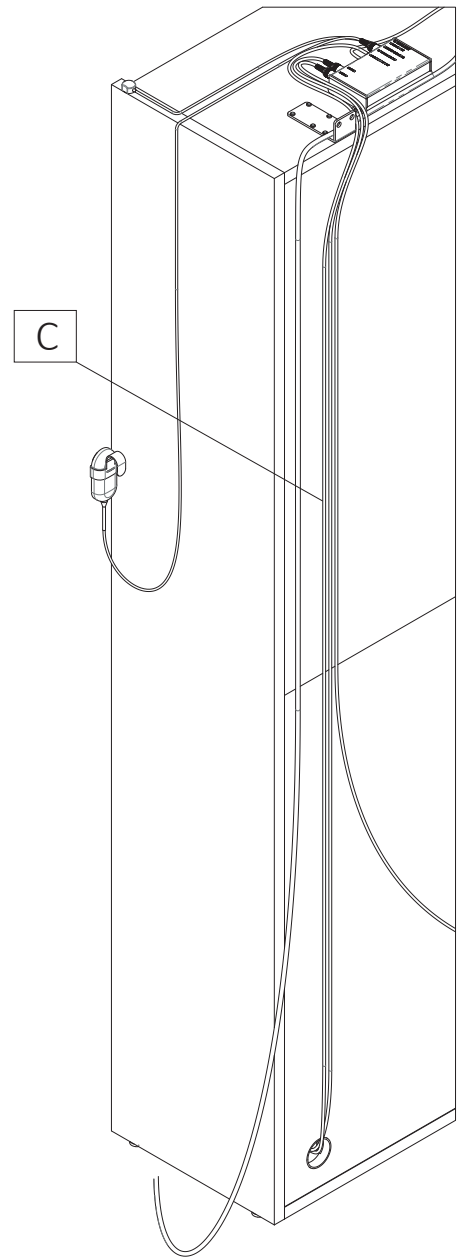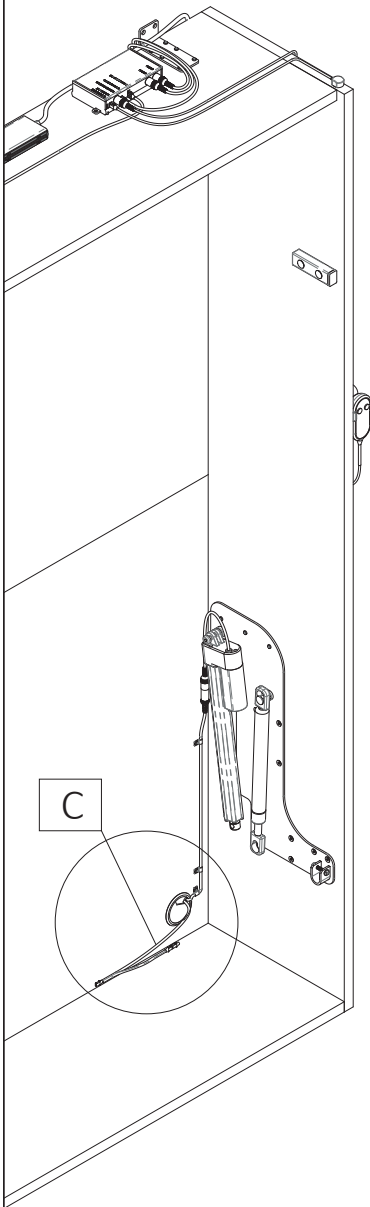


Optional sensor →



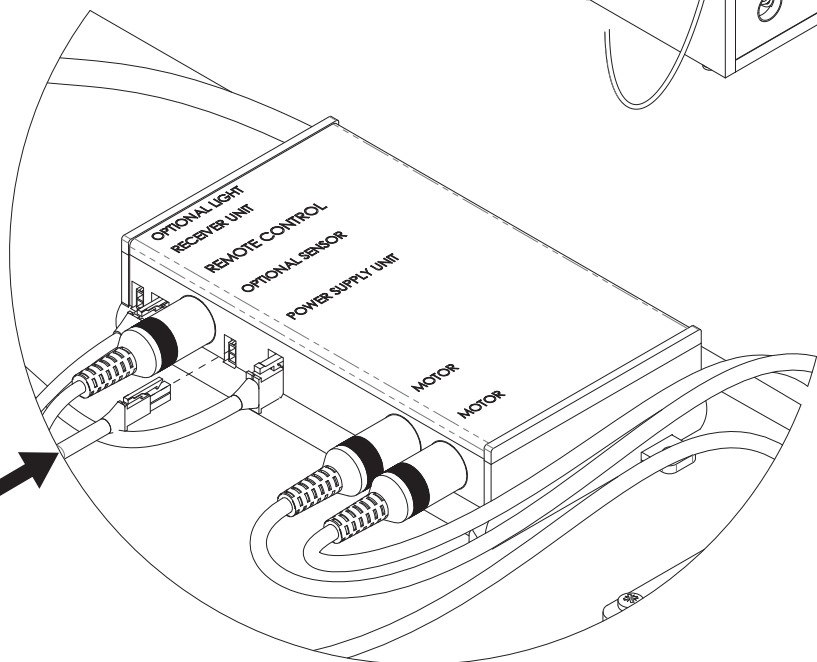


STEP 05




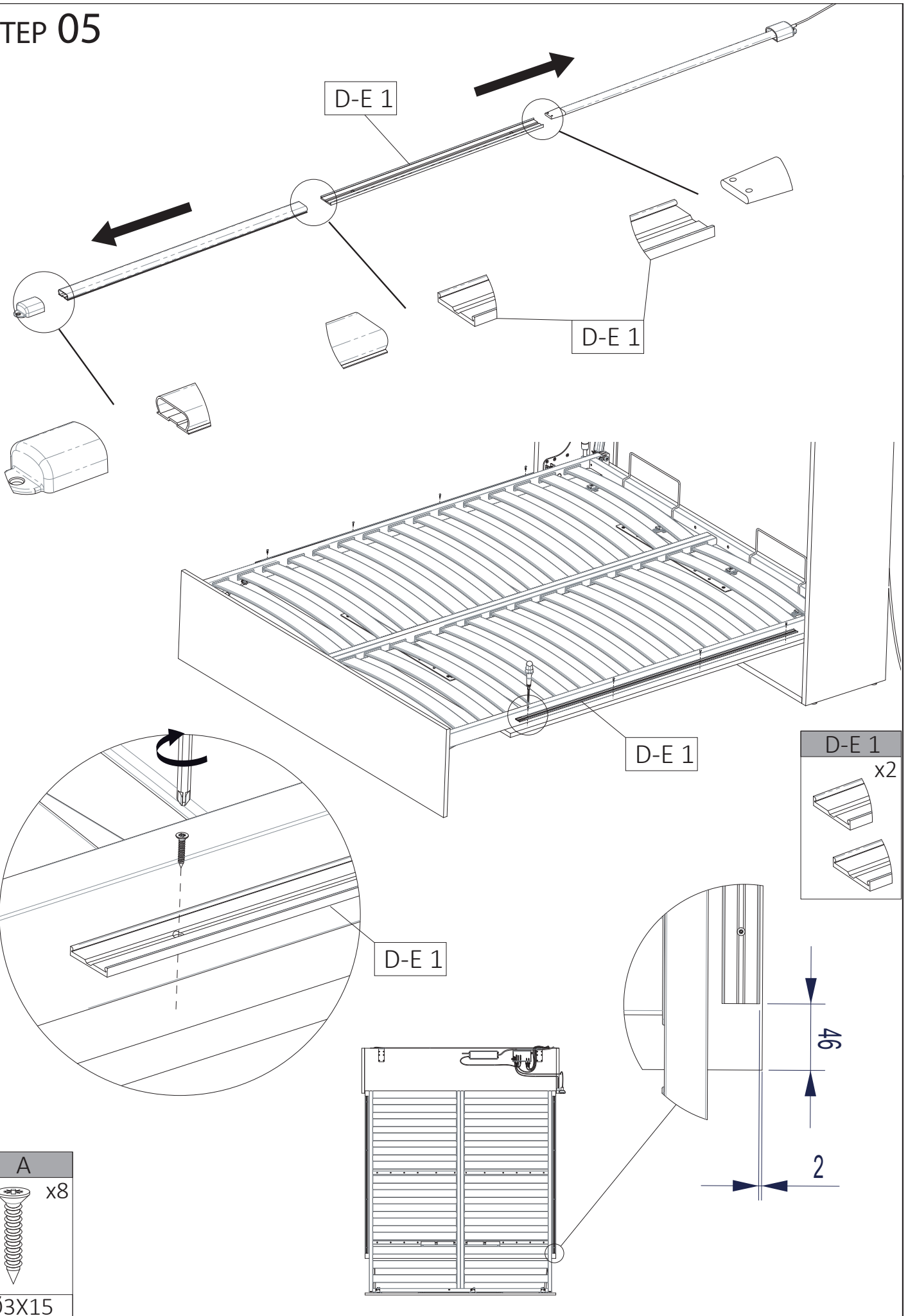





STEP 06

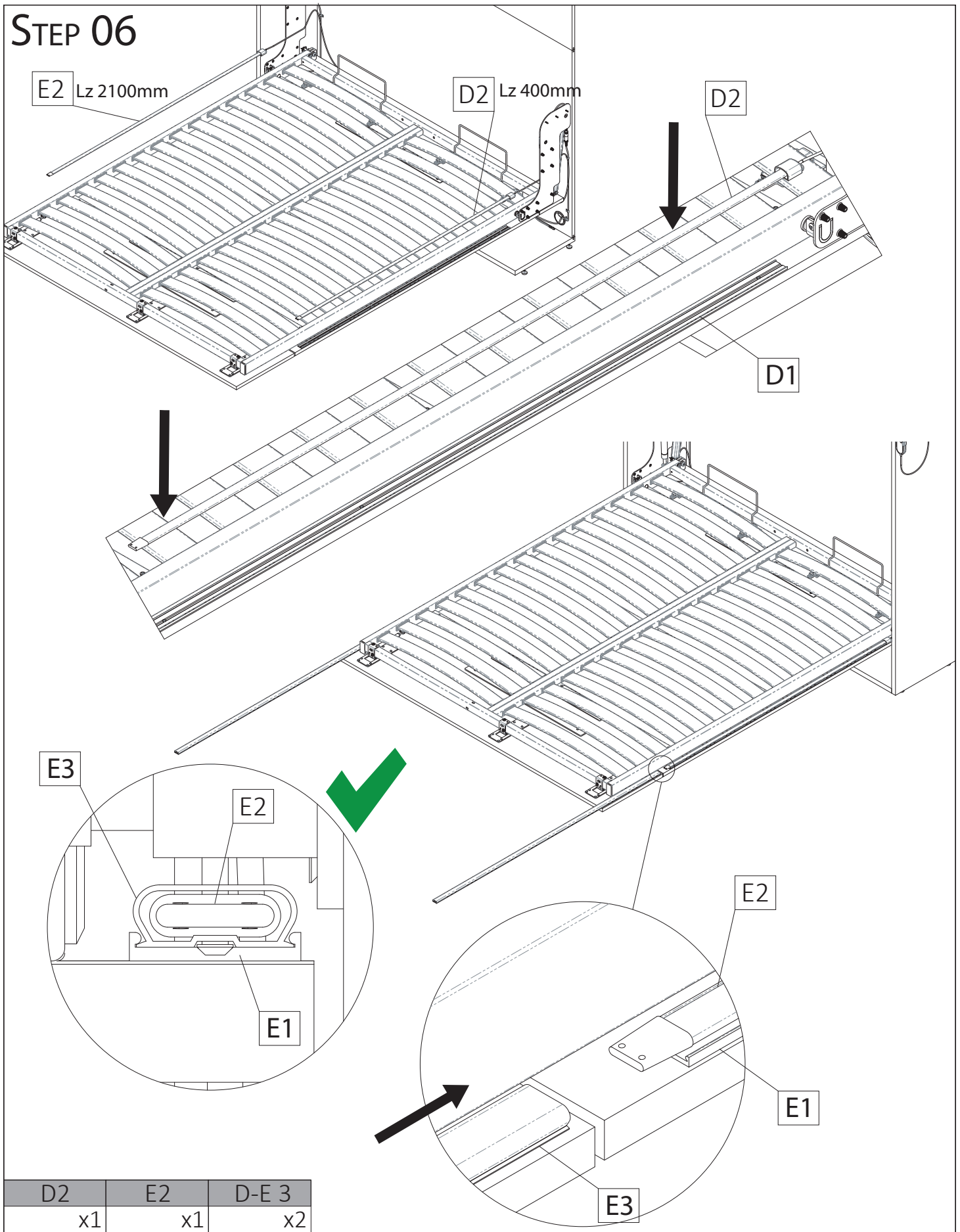

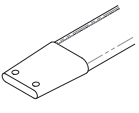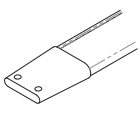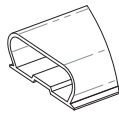
D2	E2	D-E 3
x1	x1	x2
		
Lz400mm	Lz2100mm	

STEP 07

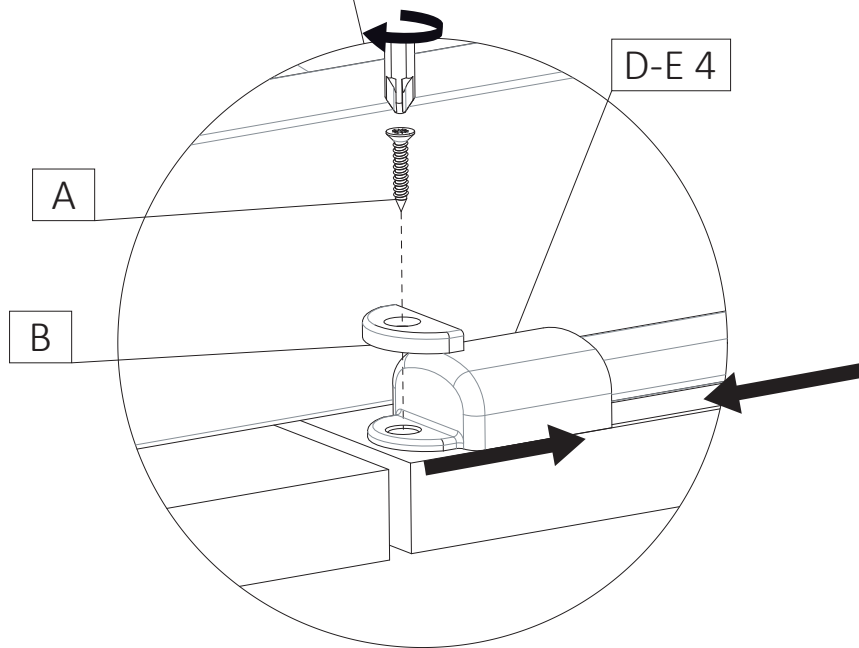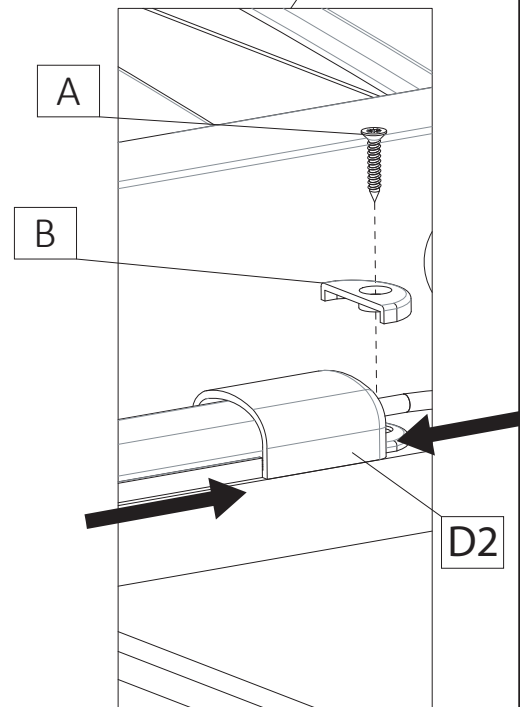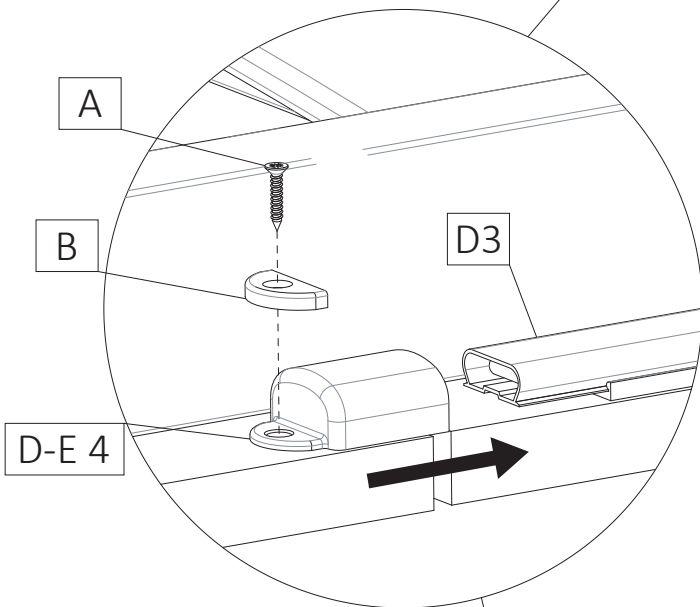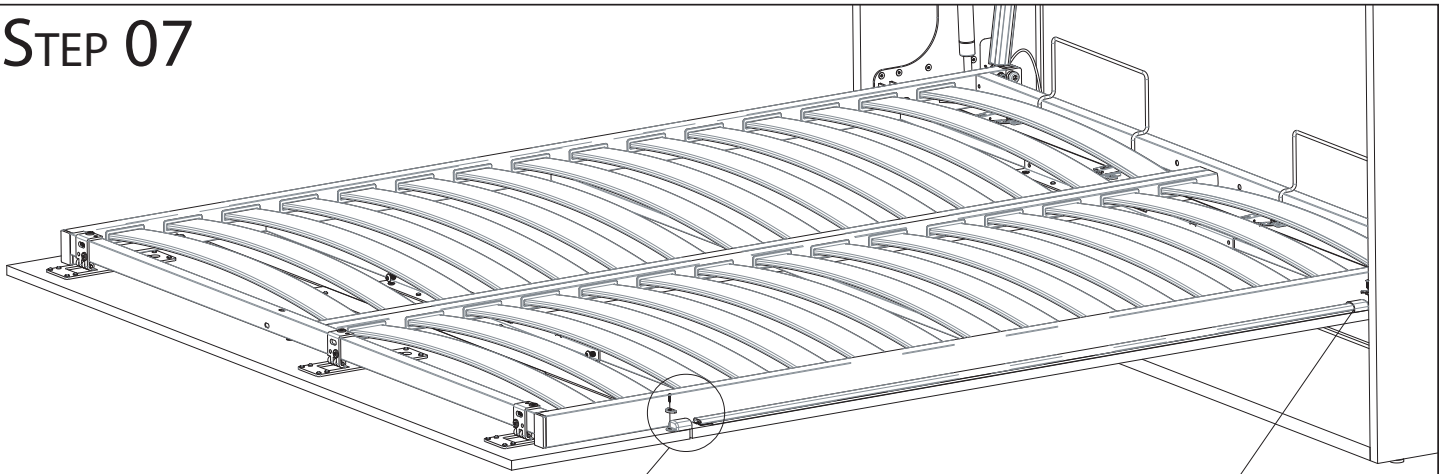


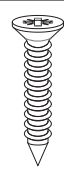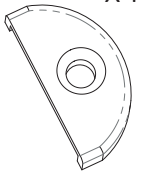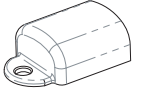A	x4
	
Ø3X15	
B	x4
	
D-E 4	x2
	


STEP 08

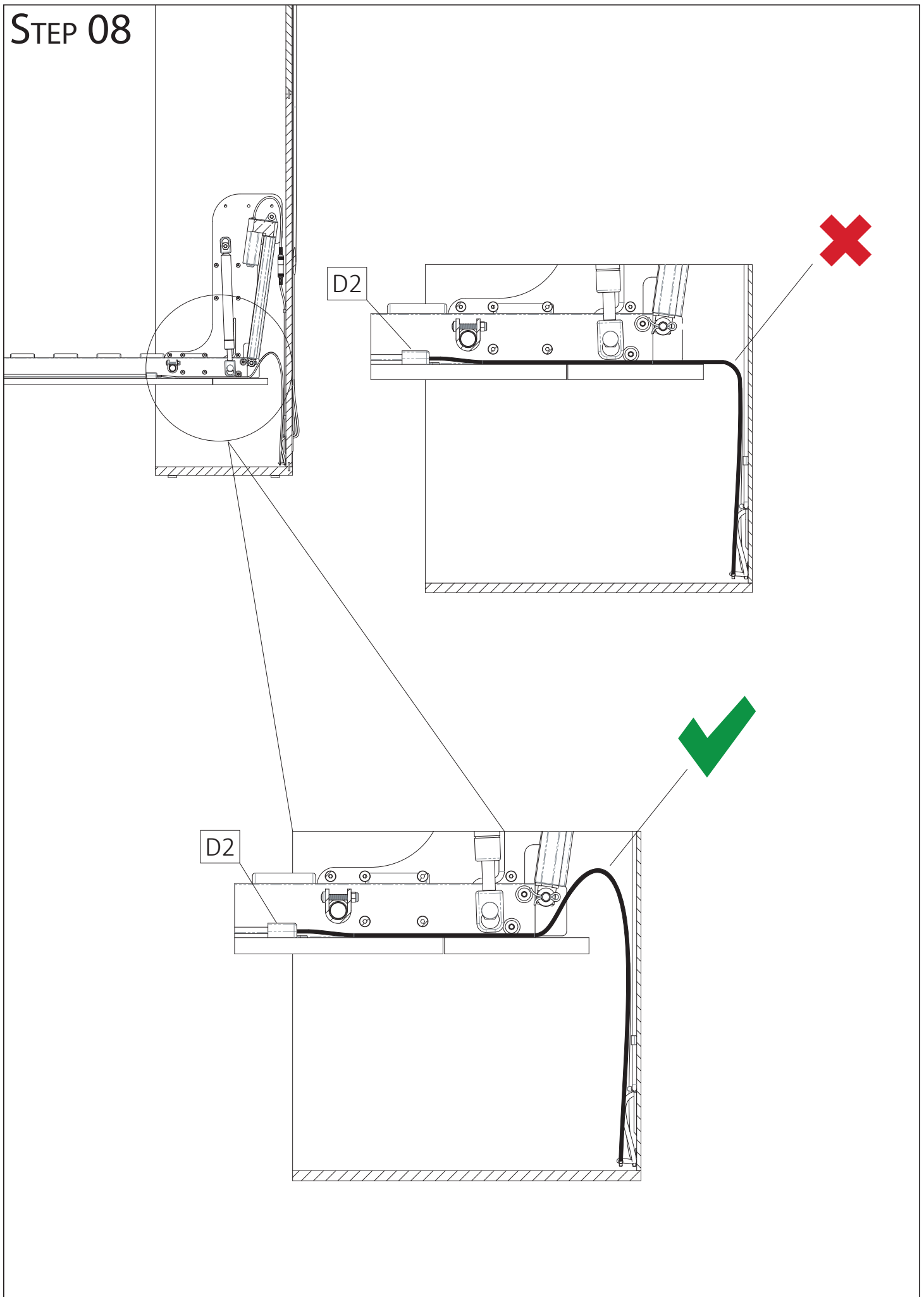

STEP 09

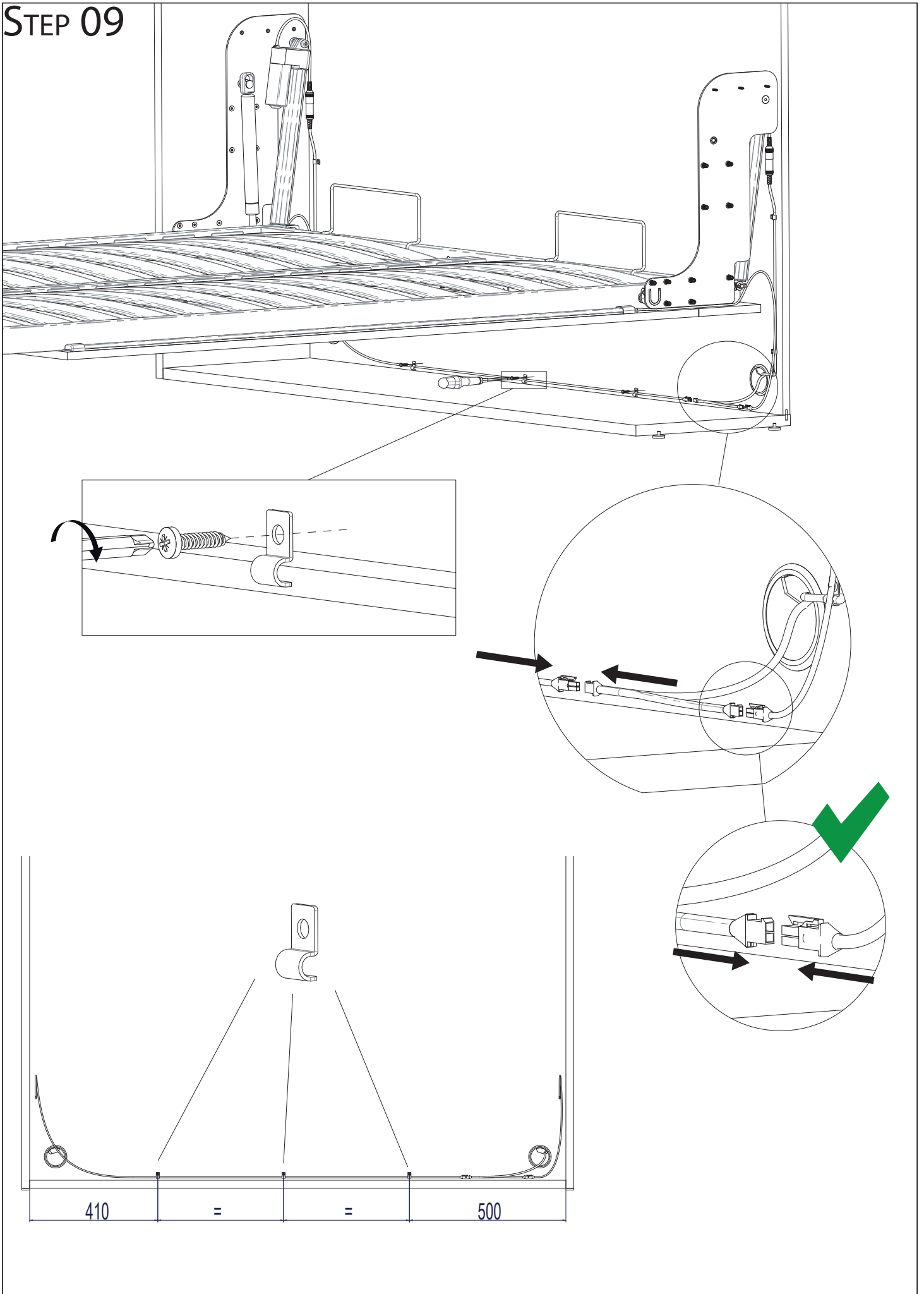

STEP 10

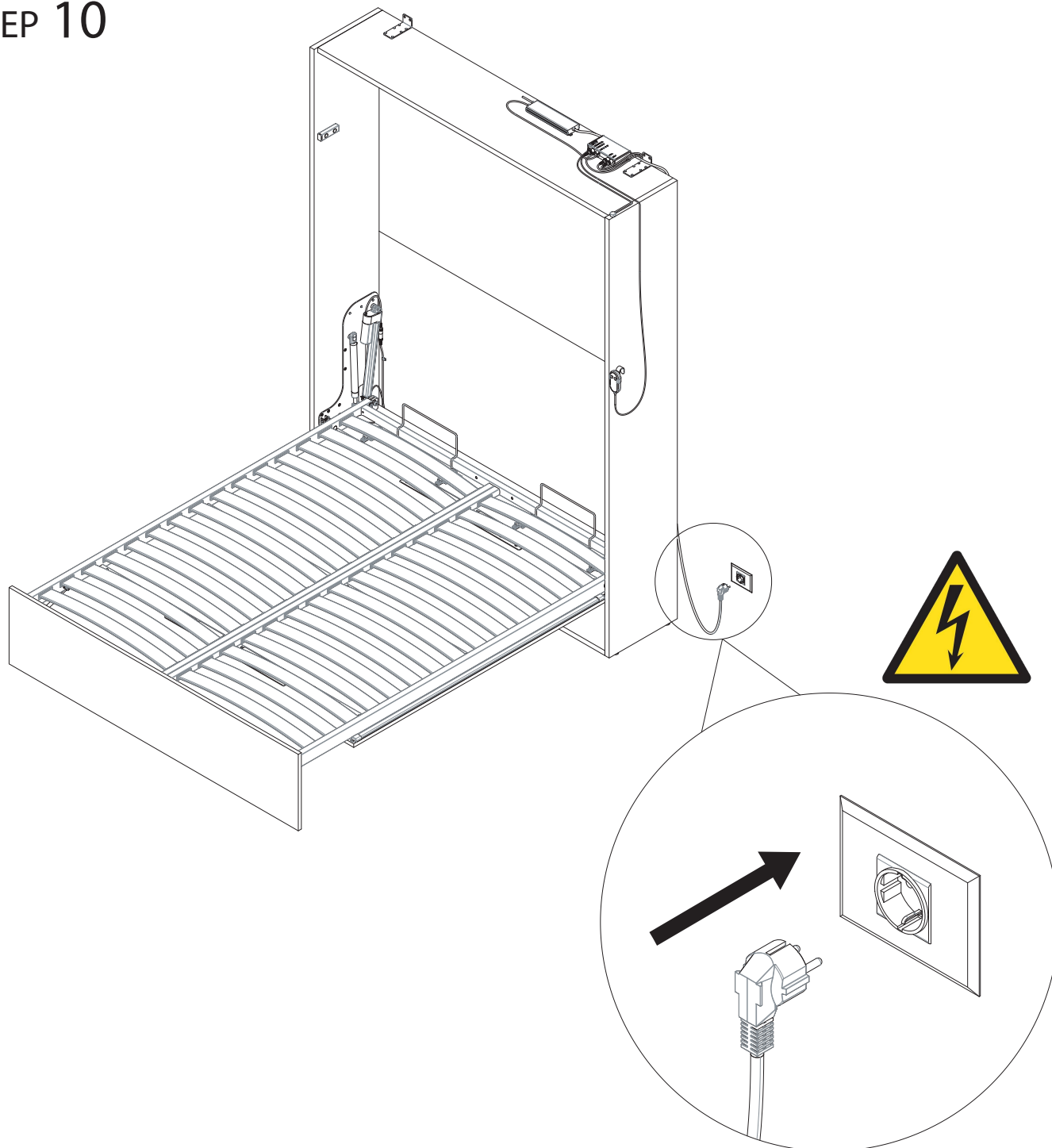

1. Accertarsi che l'impianto sia alimentato e che tutti connettori siano collegati.
2. Premere il tasto discesa tenendolo premuto per almeno 5 secondi, affinché termini il segnale acustico; così facendo il sistema determina il punto zero; operazione necessaria per il corretto funzionamento.
3. Ora è possibile movimentare la rete

N.B. L'operazione descritta al punto 2 va effettuata ogni volta che viene a mancare l'alimentazione.

1. Make sure that there's electricity and all connectors are plugged in;
2. Push the "down" button and keep it pushed for at least 5 seconds, until the "beeper" stops. This way the system determines its "null position", which is necessary for a correct functioning;
3. Now it's possible to move the bedspring

Remark: Operation described at point 2, has to be executed every time there's a power supply failure (black-out).